



**Cosyfit®**

Monteringsanvisning



Versjon: 2024

## Liste over materialer

| Gjenstander   | Antall |
|---------------|--------|
| Frontpanel    | 1 stk  |
| Bakpanel      | 1 stk  |
| Hodeendepanel | 1 stk  |
| Fotendepanel  | 1 stk  |
| Sengebunn     | 1 stk  |
| Madrass       | 1 stk  |

### Verktøy

Ingen verktøy er nødvendig.



### Viktig!

Vennligst LES og FØLG disse instruksjonene nøye.

Gå gjennom hele instruksjonen før du begynner monteringen.

Disse instruksjonene er laget for å unngå problemer som kan oppstå på grunn av feil montering eller installasjon.

### Produsent:

Safespaces (Cornholme)  
Ltd, 361 Burnley Road, Todmorden, Lancs, OL14 7DH  
Company Registration No. 5733564

**[www.safespaces.co.uk](http://www.safespaces.co.uk)**

1. Rydd et område større enn Cosyfit å arbeide i.

2. Pakk ut panelene og madrassen.

3. Finn bakpanelet (det største panelet) og sett det på gulvet og borrelåsstroppene på baksiden.




(Bildet viser glidelåskant og borrelåsstropper på et sidepanel)

4. Sett ett av sidepanelene på plass (glidelåskanten på gulvet) i rett vinkel mot bakpanelet.



5. Hold begge panelene oppreist og juster borrelåsstroppene på utsiden.

Sjekk at begge panelene står i samme høyde oppe og nede.

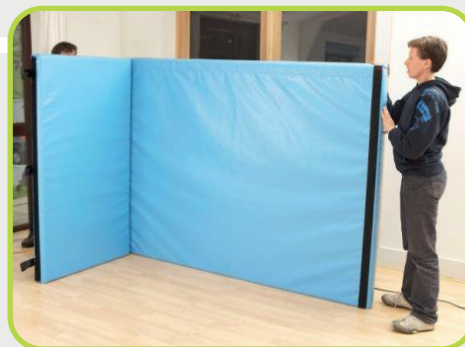

**6.**

Tre borrelåsstroppene gjennom de tilsvarende spennene og fest stramt. Ingen borrelås skal være synlig på innsiden av Cosyfit.



(Bildet viser borrelåsstrapper og spenner på frontpanelet)

**7.**

Gjenta med det andre sidepanelet.

Nå skal tre sider være stabile nok til å stå uten støtte. Hvis ikke, sjekk at stroppene er strammet nok i hjørnene. Ingen borrelås skal være synlig på innsiden.



**8.**

Sett frontpanelet på plass og juster borrelåsstroppene samt topp- og bunnkanter som i punkt 6.

Sørg for at glidelåsspenner er på utsiden.

**9.**

Kontroller at den store spennen er festet for å støtte døren. Løsne plastklipsen og åpne døren helt.



**10.**

Støtt dørens vekt, løsne spennen og brett døren rundt siden av Cosyfit. Fest den med borrelåspunktene på baksiden av døren og sidepanelet.

**11.**

Legg madrassen i bunnen med sømmen langs nederste kant.

Madrassen skal ligge tett uten glipper.



**12.**

Før døren tilbake og fest spennen. Ikke lukk glidelåsen ennå.

**13.**

Stram den svarte stroppen litt for å trekke stoffkantene sammen, og lukk deretter glidelåsen helt.

**14.**

Stram den svarte stroppen helt og fest plastspennen på glidelåsens ende.

**15.**

Gjør en siste sjekk for å sikre at innsiden er myk og at ingen borrelås er synlig. Cosyfit er nå klar til bruk!

**Din Cosyfit er nå klar til bruk!**



## HAR DU SPØRSMÅL OM PRODUKTET?

Finn fagkonsulenten her:

[www.inpo.no/kontakt-oss](http://www.inpo.no/kontakt-oss)



Eller ta kontakt på:

[post@inpo.no](mailto:post@inpo.no)



**inpo**  
IN POSITION

 InpoInPosition

 /inpo-in-position

[www.inpo.no](http://www.inpo.no)